



Alkoholschnelltester

Art.-Nr. 18.046

Gebrauchsanleitung


Vor dem Gebrauch des Gerätes mindestens 20 Minuten lang nicht rauchen und auch kein Getränk mehr einnehmen. Der Alkoholgehalt kann sich noch weitere 2 Stunden nach dem letzten Getränk erhöhen!

Der Einmal-Alkohltester enthält gelbe Kristalle, die sich durch den Alkoholgehalt im Atem grün färben. Sobald (nach Aufpusten des Beutels) die Messatemmenge durch das Testgerät strömt, zeigt die Stärke der Veränderung in Richtung grün an, ob Sie sich unter oder über dem zulässigen Promillelevel befinden.




1. Brechen Sie die beiden Kunststoffendstücke ab.
2. Schütten Sie die weißen Kristalle weg.
3. Blasen Sie den Beutel mit **einem einzigen Atemzug** auf.
4. Stecken Sie das **grüne** Endstück des Rohrs fest in das Beutelventil.
5. Drücken Sie den Beutel langsam und gleichmäßig mit beiden Händen zusammen.
Die Ausströmzeit sollte etwa 20 Sekunden dauern.
6. Lesen Sie das Ergebnis etwa 3 Minuten nach Ausströmen der gesamten Luft aus dem Beutel ab.
7. Ist Alkohol im Atem vorhanden, so färben sich die gelben Kristalle grün.

Weitere Erläuterungen zur Ablesung finden Sie unten.

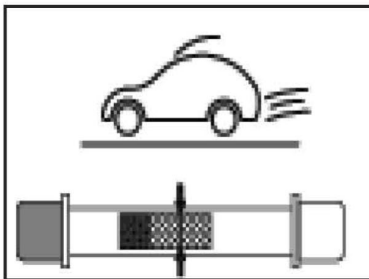

Zeigt sich eine gelbgrüne Farbe, so sind Sie **wahrscheinlich** unter dem zulässigen Limit. Sie können sich auf eigene Gefahr ans Steuer setzen, was jedoch nicht empfohlen wird.

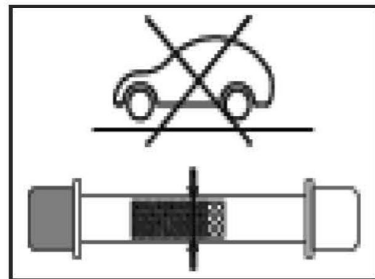

Zeigt sich eine grünblaue Farbe, die mehr gegen rot tendiert, ist Ihre Blutalkoholkonzentration höher als 0,5 Promille - **Sie dürfen auf keinen Fall mehr hinter das Steuer!**

1. Die Ergebnisse dieses Tests zeigen nur die Höhe des Alkoholgehalts an, können jedoch nicht als Nachweis gegen die Ergebnisse offizieller Bluttests der Polizei verwendet werden.
2. Hersteller und Händler übernehmen keine Haftung für Folgen der Entscheidung, die dann der Anwender trifft.
Das Fahren eines Fahrzeugs erfolgt stets auf eigene Gefahr!
3. Ist der Alkoholgehalt im Atem höher als 0,35 mg/l, was einem Blutpromillegehalt von 0,5 entspricht, so ist das Fahren unter Alkoholeinfluss extrem gefährlich und verboten!

Warnung:

Das Testgerät enthält hohe Anteile an oxidierenden Bestandteilen wie zum Beispiel Schwefelsäure und Silica. Von Kindern und Tieren fernhalten. Berührung mit der Haut und den Augen vermeiden, gegebenenfalls gründlich mit Wasser ausspülen und einen Arzt aufsuchen. Nicht einnehmen! Bei versehentlichem Verschlucken sofort den Arzt aufsuchen. Bei längerer Lagerung vor Licht schützen und hohe Temperaturen von mehr als 40 °C vermeiden. Nicht nach dem Verfallsdatum verwenden. Dieser Alkoholschnelltester kann nur einmal verwendet werden. Nach dem Gebrauch sofort entsorgen, da sich im Rohr gefährliche Chemikalien gebildet haben. Nicht in der Toilette, sondern nur mit dem Restmüll entsorgen.

1. Vor Verwendung des Geräts mindestens 20 Minuten lang keine Getränke oder Mahlzeiten mehr zu sich nehmen und nicht mehr rauchen. Alkohol benötigt bis zu 2 Stunden, bis er in den Blutkreislauf gelangt. Das Gerät in einer Umgebungstemperatur von 10-40 °C verwenden.
2. Keinen Rauch in das Blasrohr einblasen; keine Lebensmittel oder Flüssigkeiten einströmen lassen.
3. Nicht bei starkem Wind oder in stark verrauchten Bereichen oder Räumen, in denen sehr viel Alkohol verzehrt wird, verwenden.
4. Nicht in Bereichen verwenden, in denen die Luft Methylalkohol, Isopropylalkohol oder Azeton enthält, da sonst das Ergebnis verfälscht werden kann.
5. Das Gerät darf nicht dazu verwendet werden, zu bestimmen, ob noch ein Kraftfahrzeug geführt, eine Maschine bedient oder eine sonstige gefährliche Handlung durchgeführt werden kann.
6. Die Testergebnisse dieses Geräts sind nicht gerichtlich verwertbar.
7. Unter Alkoholeinfluss darf niemand selbst ein Kraftfahrzeug führen.

Zum Einmalgebrauch – Nicht erneut verwenden!

Diedrich Filmer GmbH
Jeringhaver Gast 5
D - 26316 Varel
Tel.: +49 (0) 4451 1209-0
www.filmer.de